

Meniett®

RETROUVEZ VOTRE ÉQUILIBRE™

*Soulage vos vertiges avec un
traitement simple et efficace
contre la maladie de Ménière*





La maladie de Ménière

La maladie de Ménière est une affection complexe touchant l'oreille interne ; elle peut être imprévisible et invalidante. Généralement, une seule oreille est affectée par la maladie de Ménière, mais il arrive qu'elle touche les deux oreilles. Les accès de vertige provoqués par la maladie de Ménière augmentent les risques de chutes et d'accidents.

Il n'existe pas de médicament contre la maladie de Ménière, bien que le traitement par micro pression de Meniett constitue une thérapie simple et efficace pouvant vous aider à retrouver votre joie de vivre.

Clause de non-responsabilité :

Les informations se trouvant dans ce dépliant ne doivent pas remplacer une visite chez votre médecin. Pour recevoir des informations sur le diagnostic et le traitement, veuillez à chaque fois consulter votre médecin.

Symptômes

La maladie de Ménière implique souvent l'association des symptômes suivants :

- Vertiges (étourdissements), souvent accompagnés de nausées et de vomissements
- Sifflements et bourdonnements d'oreille (acouphènes)
- Perte variable de l'audition
- Sensation de plénitude ou de pression auriculaire

L'apparition des symptômes de la maladie de Ménière est souvent imprévisible, ce qui rend difficile un fonctionnement normal dans la vie quotidienne. Après une attaque sévère de vertiges, on peut mettre plusieurs jours à récupérer.

Faire face à la maladie peut également s'avérer difficile pour les autres membres de la famille, en raison des limitations touchant la personne atteinte.

Causes

On ne connaît pas les causes initiales de la maladie de Ménière, toutefois tous les patients présentent un excès de liquide (endolymphe) dans l'oreille interne. Le déplacement de l'endolymphe envoie au cerveau un message sur votre ouïe et votre équilibre. L'excès d'endolymphe peut provoquer un gonflement de l'oreille interne, ce qui déforme les signaux transmis à votre cerveau et provoque les symptômes de la maladie de Ménière.

Diagnostic

La maladie de Ménière peut être difficile à diagnostiquer, car d'autres maladies causent parfois des symptômes identiques. Pour déterminer si vous souffrez de la maladie de Ménière, votre médecin examinera vos antécédents médicaux et procédera à un examen. Vous aurez également à faire quelques tests indolores pour vérifier votre ouïe et votre équilibre. Des examens supplémentaires peuvent s'avérer nécessaires pour exclure d'autres causes possibles de vos symptômes.

Clause de non-responsabilité :

Les informations se trouvant dans ce dépliant ne doivent pas remplacer une visite chez votre médecin. Pour recevoir des informations sur le diagnostic et le traitement, veuillez à chaque fois consulter votre médecin.



Traitement par micro pression de Meniett

La thérapie de Meniett s'appuie sur des années de recherche et peut vous aider à éviter des traitements chirurgicaux ou destructeurs. Les scientifiques croient que l'énergie des impulsions par micro pression déplace l'excès d'endolymphe, ce qui permet de normaliser la pression dans l'oreille interne et aide à soulager les vertiges de la maladie de Ménière.

Bénéfices pour les patients

- Traitement de 2e niveau de la maladie de Ménière, permettant d'éviter des traitements chirurgicaux ou destructeurs.
- Traitement peu invasif soulageant des vertiges et améliorant votre qualité de vie.
- En évitant un séjour à l'hôpital, vous n'avez pas à quitter votre maison, ni à vous absenter de votre travail.
- Facile à utiliser, où que vous soyez, pendant une courte durée chaque jour.



Clause de non-responsabilité :

Les informations se trouvant dans ce dépliant ne doivent pas remplacer une visite chez votre médecin. Pour recevoir des informations sur le diagnostic et le traitement, veuillez à chaque fois consulter votre médecin.

Consultez votre médecin

Pour commencer un traitement avec la thérapie de Meniett, vous devez tout d'abord obtenir une ordonnance de votre médecin. Il sera également indispensable de placer un petit conduit de ventilation dans votre tympan.

En commençant la thérapie de Meniett, veuillez suivre les recommandations et ne sauter aucun des traitements prescrits. La thérapie de Meniett peut réduire vos vertiges et améliorer votre qualité de vie.

Votre plan de traitement

Les médecins prescrivent généralement trois traitements Meniett par jour, d'une durée de 5 minutes environ chacun. Une fois que vous avez votre appareil Meniett, votre médecin vous montrera de quelle façon l'utiliser. L'appareil est petit et facile d'emploi, ce qui vous permet d'effectuer vos traitements à la maison, au travail, ou à n'importe quel autre endroit.

Si votre maladie de Ménière répond à la thérapie de Meniett, vos attaques de vertiges se feront moins fréquentes et/ou moins intenses. Vous aurez également à effectuer des visites de suivi chez votre médecin, pour que celui-ci puisse contrôler votre maladie de Ménière ainsi que le conduit de ventilation.

Il est essentiel que vous ne sautiez aucun de vos traitements Meniett quotidiens. Dans le cas contraire, il se peut que vous ne ressentiez pas tous les effets thérapeutiques et deveniez candidat pour un traitement par chirurgie invasive autrement inutile.

Disponibilité


Votre médecin ORL pourra vous expliquer les options disponibles pour obtenir votre appareil personnel de micro pression Meniett.

Clause de non-responsabilité :

Les informations se trouvant dans ce dépliant ne doivent pas remplacer une visite chez votre médecin. Pour recevoir des informations sur le diagnostic et le traitement, veuillez à chaque fois consulter votre médecin.

Options de traitement

En fonction de leurs préférences personnelles, de nombreux médecins ORL suivront une progression dégressive du traitement de la maladie, démarrant par des traitements conservateurs avant de passer à des thérapies plus invasives ou à des procédures chirurgicales destructrices.

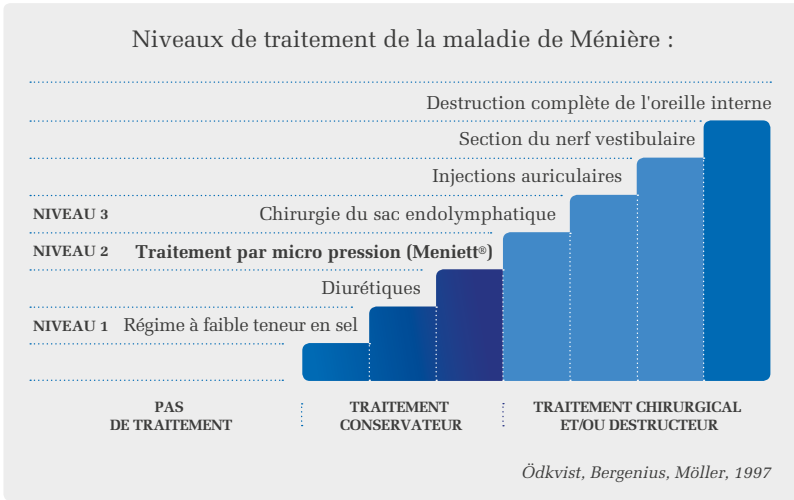

Changements de mode de vie et traitement médical

Avant de passer à la thérapie par méthode de micro pression de Meniett, on essaie souvent des traitements constituant en une association de régimes à faible teneur en sel et de différents types de médicaments.

Thérapie chirurgicale ou destructrice

La chirurgie est en général envisagée seulement après que le traitement avec recours à des méthodes de traitement moins risquées n'ait pas apporté le soulagement escompté. Les traitements comprennent un drainage du liquide se trouvant dans l'oreille interne, la section du nerf vestibulaire et des injections auriculaires destinées à réduire ou à détruire la fonction de l'oreille interne.

Clause de non-responsabilité :

Les informations se trouvant dans ce dépliant ne doivent pas remplacer une visite chez votre médecin.

Pour recevoir des informations sur le diagnostic et le traitement, veuillez à chaque fois consulter votre médecin.

Découvrez
de quelle
façon fonctionne
le générateur Meniett
**et faites la connaissance
de personnes** auxquelles
la Thérapie de Meniett
a profité sur le site
meniett.com



Découvrez le site meniett.com

Pour plus d'informations sur la thérapie par micro pression de Meniett, visitez le site meniett.com ou consultez votre médecin ORL.

Préparez-vous à votre visite chez le médecin

Ayez recours au journal de symptômes de la maladie de Ménière et à la grille d'autoévaluation de la maladie de Ménière pour rapporter les informations sur votre santé et vous préparer.

Clause de non-responsabilité :

Les informations se trouvant dans ce dépliant ne doivent pas remplacer une visite chez votre médecin. Pour recevoir des informations sur le diagnostic et le traitement, veuillez à chaque fois consulter votre médecin.



Distributeur canadien autorisé

T.B. Clift Limited
34 O'Leary Avenue
St. John's, NL A1B 2C7
Téléphone : 709-753-6850
Fax : 709-753-7654

Meniett® et Restore Life's Balance™ sont des marques de commerce de Meniett A.C. © 2016, Meniett A.C. Tous droits réservés

2017-05 ver. A FR

Meniett®
RETROUVEZ VOTRE ÉQUILIBRE™